

## Bröst - Mellannålsbiopsi (core-biopsi, vacuumcore-biopsi)

Laboratoriemedicin

Akrediterad

### Provtagningsmaterial

Se nedan

### Remiss

Beställs elektroniskt, *Bröstkirurgiska preparat*. Välj bild *Bröst*. För Mellannålsbiopsi (core-biopsi, vacuum-corebiopsi) använd *PAD*. Välj bild *Bröst*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Bröstkirurgiska preparat*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

### Remissuppgifter

- Ange typ av biopsi och antal biopsier per fraktion
- Önskemål om immun och/eller FISH-/CISH-analys markeras tydligt på remiss.

Se *Provtagning och provhantering – Allmänna anvisningar*

### Provtagning

Viktigt att använda tillräckligt stort provkärl så att vävnaden inte deformeras.

Etikettera provkärlet vertikalt.

Se *Provtagningskärl och rätt etikettering klinisk patologi*

### Provhantering

Varje fraktion hanteras för sig och läggs i separat burk, numrerad enligt remissuppgifter.

### Fixering

Fosfatbuffrad formaldehydlösning 4 %, tio gånger preparatvolymen. Detta är dock inte alltid möjligt till de största preparaten.

### Markering av preparat

Ingen.

### Förvaring och transport

Rumstemperatur. Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

### Förväntad svarstid

SVF och Medicinsk prioriterade biopsier eller motsvarande 1–6 arbetsdagar.

Operationspreparat ca 10 dagar.

Rutin 2–4 veckor.

### Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

### Provtagningsmaterial

Provkärl			

### Övrigt

**Utarbetad av:** Anja Solterbeck

**Medicinskt ansvarig:** Charlotta Gestblom