

Bronk - Borstprov

Laboratoriemedicin

Kvalitetssäkrad

Provtagningsmaterial

Se nedan

Remiss

Beställs elektroniskt, *Cytologi*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Morfologi (patologi och cytologi)*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

Se *Provtagning – Allmänna anvisningar*

Provtagning

40 mL provburk med 30 mL ThinPrep CytoLyt Solution.

Se *Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi*

Provhantering

Borste fixeras i ThinPrep CytoLyt Solution. Direkt efter provtagning roteras borste i fixeringslösningen samtidigt som den trycks mot burkens kant, detta för att celler ska lossna. Efter att borsten roterats låt den stå kvar i burken.

Fixering

ThinPrep CytoLyt Solution.

Markering av preparat

Ingen.

Förvaring och transport

Prov fixerat med ThinPrep CytoLyt Solution kan under provtagningsdagen förvaras i rumstemperatur, därefter förvaring i kylskåp.

Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad

Förväntad svarstid

2 veckor.

Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

Provtagningsmaterial

Provkärl



Provbuk utan tillsats

Volym

40 mL

Art.nr. (Inköpsportalen)

5043101

Övrigt

Utarbetad av: Henrik Edvardsson
Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom