

Bronk - Bronskölvätska

Laboratoriemedicin

Kvalitetssäkrad

Provtagningsmaterial

Se nedan

Remiss

Beställs elektroniskt, *Cytologi*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Morfologi (patologi och cytologi)*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

Se *Provtagning – Allmänna anvisningar*

Provtagning

Se *Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi*

Provhantering

Bronskölvätskan hälls direkt i plastflaska.

Fixering

ThinPrep CytoLyt Solution.

Blanda lika delar bronskölvätska med lika delar ThinPrep CytoLyt Solution.

Till exempel 50 mL bronskölvätska fixeras med 50 mL ThinPrep CytoLyt Solution.

Markering av preparat

Ingen.

Förvaring och transport

Prov fixerat med ThinPrep CytoLyt Solution kan under provtagningsdagen förvaras i rumstemperatur, därefter förvaring i kylskåp.

Provet lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

Förväntad svarstid

2 veckor.

Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

Provtagningsmaterial

Provkärl



Provbuk utan tillsats



Burk med snäpplock

Volym

40 mL

250 mL

Fyllnadsvolym (mL)

200 mL

Art.nr. (Inköpsportalen)

5043101

5042044

Övrigt

Utarbetad av: Henrik Edvardsson
Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom