

## Bronk - Sputum

Laboratoriemedicin

Kvalitetssäkrad

### Provtagningsmaterial

Se nedan

### Remiss

Beställs elektroniskt, *Cytologi*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Morfologi (patologi och cytologi)*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

### Remissuppgifter

Se *Provtagning – Allmänna anvisningar*

### Provtagning

Provbuk utan tillsats med skruvkork 40 mL alternativt 30 mL och transporthylsa. Etikertera provkärlet vertikalt.

Se *Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi*

### Provhantering

Låt patienten (gärna efter instruktion från sjukgymnast) hosta upp sekret från nedre luftvägarna, direkt i provburk, skall vara fritt från saliv.

### Fixering

Etanol 70 %, skall utgöra 2/3 av provburkens volym.

### Markering av preparat

### Förvaring och transport

Rumstemperatur i transporthylsa. Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

### Förväntad svarstid

2 veckor.

### Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

### Provtagningsmaterial

#### Provkärl



Provbuk utan tillsats



Provbuk utan tillsats med transporthylsa

#### Volym

40 mL

30 mL

#### Art.nr. (Inköpsportalen)

5043101

#### Övrigt

**Utarbetad av:** Henrik Edvardsson

**Medicinskt ansvarig:** Charlotta Gestblom