

Hud - If-stans

Laboratoriemedicin

Kvalitetssäkrad

Provtagningsmaterial

Se nedan

Remiss

Beställs elektroniskt.

Kan även beställas på pappersremiss, *Immunofluorescens*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

För generella krav på remissuppgifter se *Provtagning och provhantering – Allmänna anvisningar*.

Provtagning

Se *Provtagningskärl och rätt etikettering klinisk patologi*

Provhantering

Varje fraktion hanteras för sig och läggs i separat burk, numrerad enligt remissuppgifter.

Fixering

Preparatet läggs i Histocon, tio gånger preparatvolymen.

Markering av preparat

Förvaring och transport

Förvaras i kylskåp och lämnas till lab inom 48 timmar från provtagning. Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

OBS – vid provtagning på fredagar eller dag före helgdag lämnas provet så snart som möjligt och senast 15.30 direkt till personal inne på klinisk patologi. Notera då även tid för provtagning på remissen.

Förväntad svarstid

Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

Provtagningsmaterial

Provkärl			
	Provbuk utan tillsats		
Volym	40 mL		
Art.nr. (Inköpsportalen)	5043101		

Övrigt

Utarbetad av: Henrik Edvardsson

Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom