

Placenta

Laboratoriemedicin

Kvalitetssäkrad

Provtagningsmaterial

Se nedan

Remiss

Beställs elektroniskt, *PAD*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Morfologi (patologi och cytologi)*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

Se *Provtagning och provhantering – Allmänna anvisningar*

Provtagning

Viktigt att använda tillräckligt stort provkärl så att vävnaden inte deformeras. Etikettera provkärlet vertikalt.

Se *Provtagningskärl och etikettering*

Provhantering

Är placentas vikt av kliniskt värde rekommenderas vägning innan fixering.

Fixering

Fosfatbuffrad formaldehydlösning 4 %, tio gånger preparatvolymen. Detta är dock inte alltid möjligt till de största preparaten.

Vid mer komplicerade frågeställningar som till exempel flerbördsplacenta eller tillstånd där provtagning för mikrobiologisk eller genetisk diagnostik kan vara aktuellt lämnas provet färskt dvs utan fixering.

Markering av preparat

Markering behövs i allmänhet inte men kan vara till hjälp vid till exempel små lesioner som kan vara svåra att identifiera efter formalinfixering

Förvaring och transport

Fixerade prov: Rumstemperatur. Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

Färska prov: Transporteras **omgående** efter uttagandet till Klinisk patologi, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad. Ring på signalknappen utanför rum märkt "Färska prover" och invänta personal. Om prov inte kan transporteras direkt förvaras det i kylskåp i väntan på transport. Prov ska anmälas till laboratoriet på telefon 010-83 911 81. Färska prover omhändertas 08.00-16.00. Om provet beräknas anlända efter 16.00 kontaktas Klinisk patologi för diskussion om hantering.

Förväntad svarstid

2-4 veckor

Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

Provtagningsmaterial

Provkärl



Hink med lock

Volym	2.1L	3.2L	5.5L
Art.nr. (Inköpsportalen)	5045047	7073106	5045041
Övrigt			

Utarbetad av: Anja Solterbeck

Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom